

Manuelle Reinigung

Für die AnzenTM Sicherheitskalpell-Griffstücke wird das folgende Reinigungsverfahren empfohlen:



1 Die Griffstücke einzeln unter fließendem kaltem Leitungswasser eine (1) Minute lang abspülen.



2 Eine Reinigungslösung mit einem enzymatischen Reinigungsmittel nach Herstelleranweisungen zubereiten; dazu die als wirksam geltende Mindestkonzentration und kaltes Leitungswasser verwenden. Die Griffstücke fünf (5) Minuten lang in das Tauchbad mit der Reinigungslösung geben.



3 Die in der Reinigungslösung eingetauchten Griffstücke einzeln mit einer weichen Bürste eine (1) Minute lang abbürsten.



4 Die Griffstücke einzeln unter fließendem kaltem Leitungswasser eine (1) Minute lang abspülen.

5 Die Griffstücke mit einem weichen, flusenfreien Tuch gründlich trocknen.

Maschinelle Reinigung

Für das Anzen Sicherheitskalpell-Griffstück werden die folgenden maschinellen Reinigungsparameter empfohlen:

Parameter für den maschinellen Waschzyklus

Phase	Dauer (mm:ss)	Temperatur	Reinigungsmittel
Alkalische Wäsche	04:00	60° C	Steris Prolystica 2X konzentrierter alkalischer Reiniger, 1 ml pro Liter (als wirksam geltende Mindestkonzentration) oder gleichwertiges Produkt (gemäß Herstelleranweisungen)
Wäsche	02:00	Heißes Leitungswasser	Steris Prolystica 2X konzentrierter neutraler Reiniger, 1 ml pro Liter (als wirksam geltende Mindestkonzentration) oder gleichwertiges Produkt (gemäß Herstelleranweisungen)
Spülung	02:00	70° C	n.a.
Trocknen	15:00	80° C	n.a.

Sterilisation

Vor der Sterilisation muss das AnzenTM Sicherheitskalpell trocken sein und es dürfen sich keine Gewebe, Körperflüssigkeiten und Reinigungslösungen mehr daran befinden.

Der folgende Dampfsterilisationszyklus wurde auf Sterilität geprüft:

Sterilisationsart: Vorvakuum	Vorkonditionierungspulse: 4	Temp. minima: 132° C
Vollständige Zyklusdauer: 3 Min.	Mindest-Trocknungsdauer: 20 Min.	Verpackung: Einzelbeutel. Nicht mit Kartusche sterilisieren.