



1 Connexion de la cartouche de lame

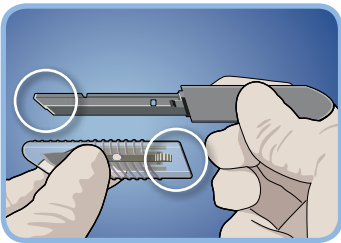


Aligner la poignée avec la cartouche en faisant correspondre les angles des extrémités.

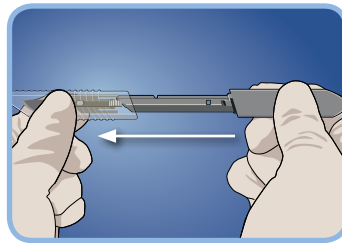


Insérer la poignée dans la cartouche de lame.

2 Extension de la lame

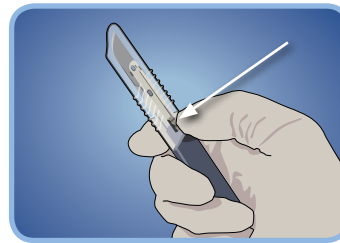


Appuyer sur le bouton de la cartouche.

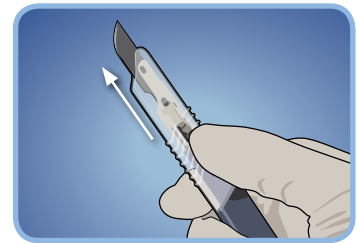


Glisser le bouton vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

3 Rétraction de la lame

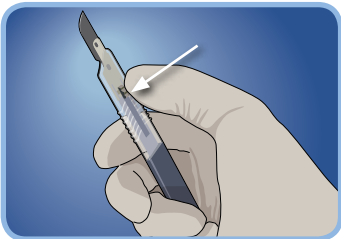


Appuyer sur le bouton de la cartouche.

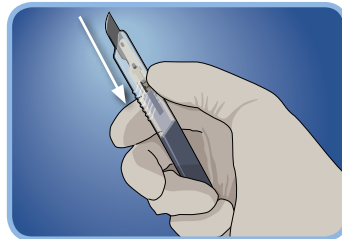


Glisser le bouton vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

4 Déconnexion de la cartouche de lame

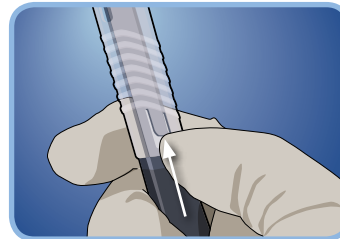

Soulever la languette de déconnexion (vue dorsale).

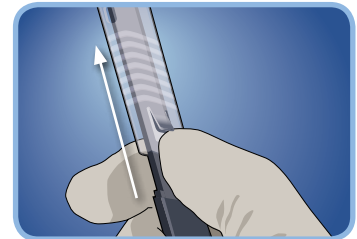

Glisser la cartouche vers l'avant pour l'éjecter.

Ce dispositif est à usage unique seulement. La réutilisation de ce dispositif peut entraîner une contamination croisée.

Vue ventrale (côté bouton)



Vue dorsale (côté languette de déconnexion)



Bouton

Languette de déconnexion

Visitez anzenscalpel.com ou contactez nous :

3883 Rogers Bridge Road NW
Suite 501
Duluth, Georgia 30097, USA

+1-404-855-3655 | tel
+1-770-559-4382 | fax
sales@medipurpose.com