



1 Klingenkartusche anbringen

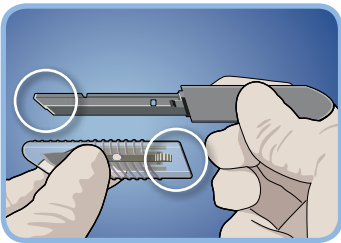


Griffstück und Kartusche anhand ihrer Endwinkel aufeinander ausrichten.

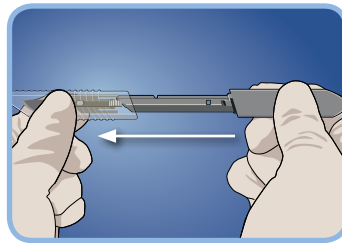


Griffstück in die Kartusche einschieben.

2 Klinge ausfahren

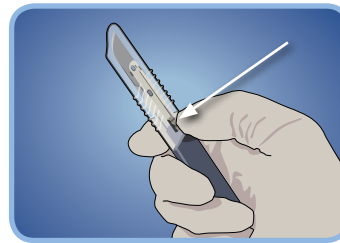


Knopf an der Kartusche drücken.

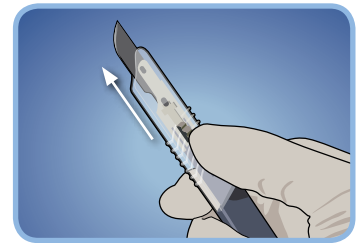


Knopf nach vorne schieben, bis er einrastet.

3 Klinge einziehen

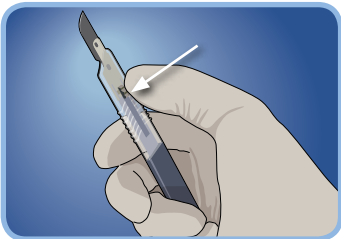


Knopf an der Kartusche drücken.

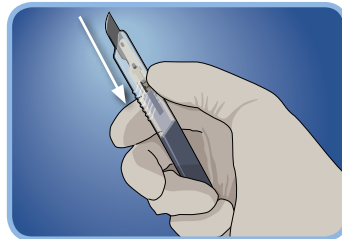


Knopf nach hinten schieben, bis er einrastet.

4 Klingenkartusche abnehmen

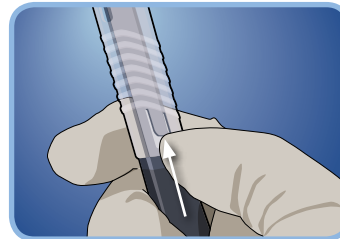

Entriegelungslasche anheben (Rückansicht).

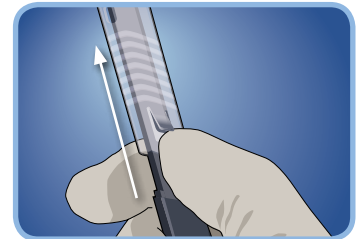


Klingenkartusche nach vorne schieben, um sie abzunehmen.

Das Gerät ist zur einmaligen Verwendung bestimmt. Die Wiederverwendung dieses Geräts kann zu einer Kreuzkontamination.

Vorderansicht (Seite mit Knopf)



Rückansicht (Seite mit Entriegelungslasche)

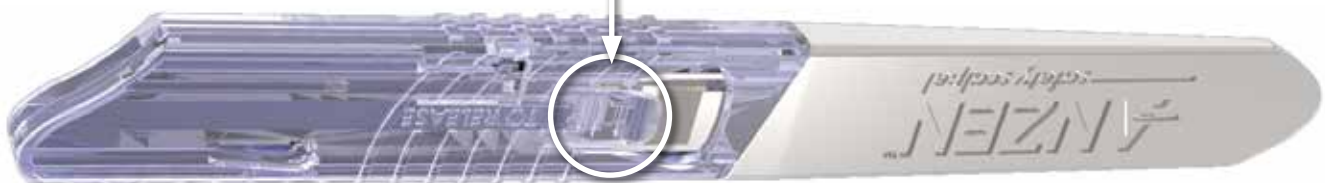

Knopf

Entriegelungslasche

Besuchen Sie anzenscalpel.com oder kontaktieren Sie uns:

3883 Rogers Bridge Road NW
Suite 501
Duluth, Georgia 30097, USA

+1-404-855-3655 | tel
+1-770-559-4382 | fax
sales@medipurpose.com

Ein Produkt von **MediPurpose**[™]
www.medipurpose.com