



① Connexion de la cartouche de lame

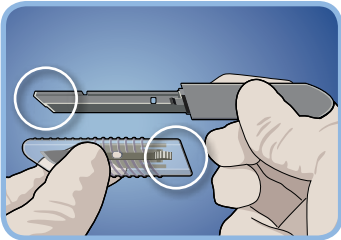


Aligner la poignée avec la cartouche en faisant correspondre les angles des extrémités.

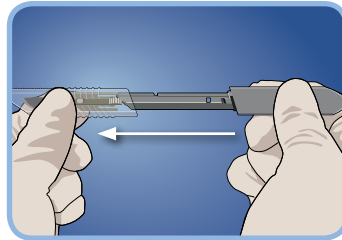


Insérer la poignée dans la cartouche de lame.

② Extension de la lame

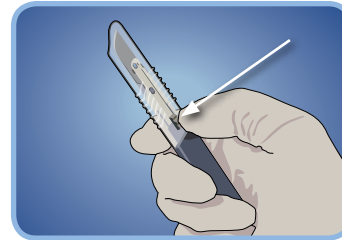


Appuyer sur le bouton de la cartouche.

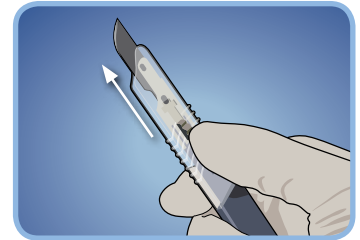

Glisser le bouton vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

③ Rétraction de la lame

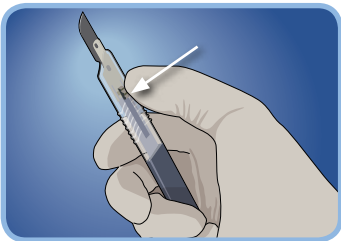


Appuyer sur le bouton de la cartouche.




Glisser le bouton vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

④ Déconnexion de la cartouche de lame

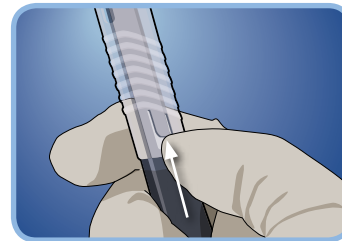

Soulever la languette de déconnexion (vue dorsale).

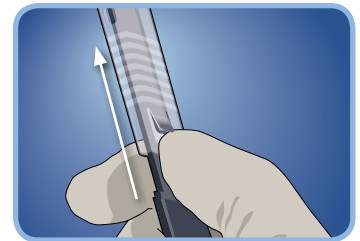


Glisser la cartouche vers l'avant pour l'éjecter.


Ce dispositif est à usage unique seulement. Sa réutilisation peut entraîner une contamination croisée

1. Avertissement : À usage unique. Ne pas utiliser si l'emballage est cassé ; Ne pas stocker dans un environnement à haute température, à forte humidité ou avec des gaz corrosifs. Ne pas utiliser si le produit est humide ou périmé.
2. Le scalpel de sécurité Anzen est conçu pour être utilisé par des professionnels de la santé.
3. En cas d'incident grave, contactez MediPurpose à sales@medipurpose.com et/ou l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit.

Vue ventrale (côté bouton)

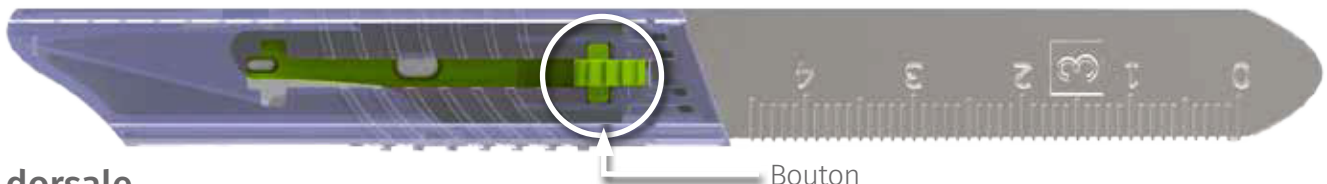

Vue dorsale (côté languette de déconnexion)

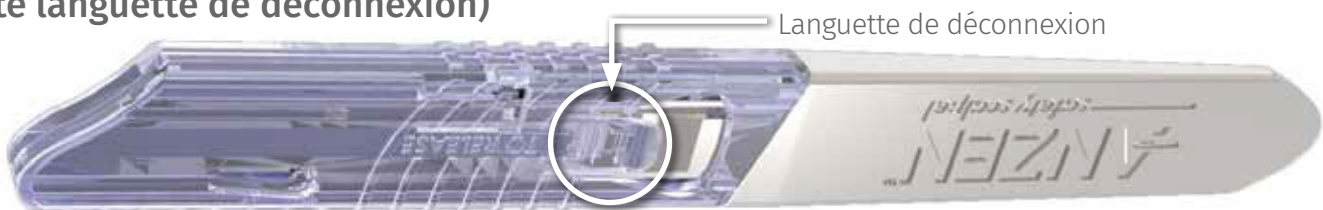

Visitez anzenscalpel.com ou contactez nous :

MEDIPURPOSE PTE. LTD.
10 Anson Road, #12-08
International Plaza, Singapore 079903

EC REP Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

CE 0197 **MD**

2862 Buford Hwy, Suite 105, Duluth, Georgia 30096, USA
tel +1-404-855-3655 | fax +1-770-559-4382 | sales@medipurpose.com

©2025 MediPurpose Pte Ltd

Un produit de **MediPurpose**TM
www.medipurpose.com