



1 Klingenkartusche anbringen

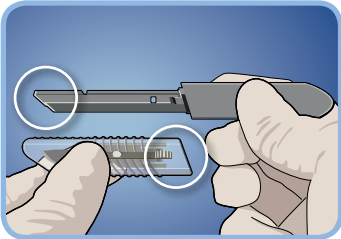


Griffstück und Kartusche anhand ihrer Endwinkel aufeinander ausrichten.

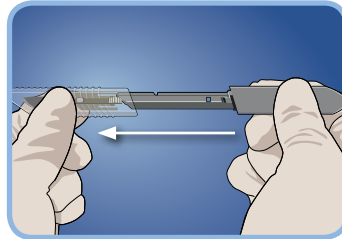


Griffstück in die Kartusche einschieben.

2 Klinge ausfahren

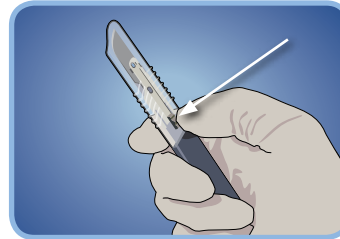


Knopf an der Kartusche drücken.

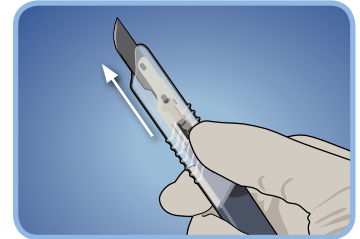

Knopf nach vorne schieben, bis er einrastet.

3 Klinge einziehen

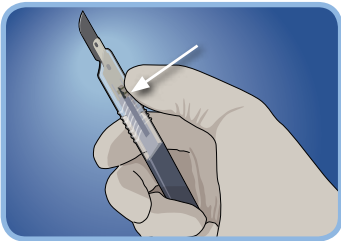


Knopf an der Kartusche drücken.




Knopf nach hinten schieben, bis er einrastet.

4 Klingenkartusche abnehmen

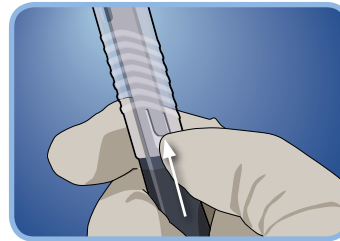

Entriegelungslasche anheben (Rückansicht).

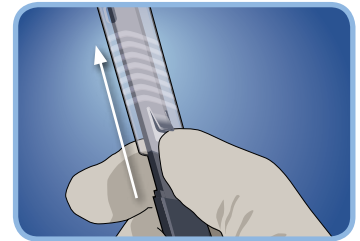


Klingenkartusche nach vorne schieben, um sie abzunehmen.


Das Gerät ist zur einmaligen Verwendung bestimmt. Die Wiederverwendung dieses Geräts kann zu einer Kreuzkontamination.

1. Warnung: Nur zur Verwendung bei einem Patienten. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist; Nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit oder mit korrosiven Gasen lagern. Nicht verwenden, wenn das Produkt feucht oder abgelaufen ist.
2. Das Anzen-Sicherheitskalpell ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal konzipiert.
3. Wenden Sie sich im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls an MediPurpose unter sales@medipurpose.com und/oder an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem sich der Vorfall ereignet hat.

Vorderansicht (Seite mit Knopf)

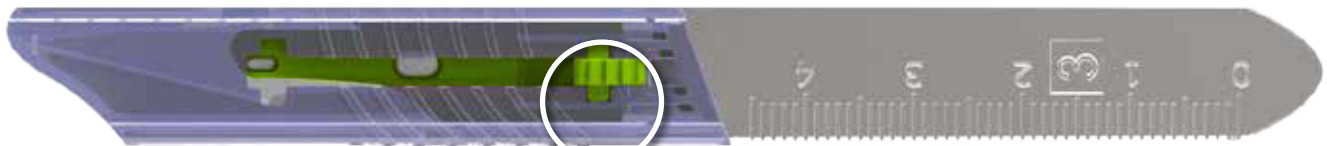

Rückansicht (Seite mit Entriegelungslasche)

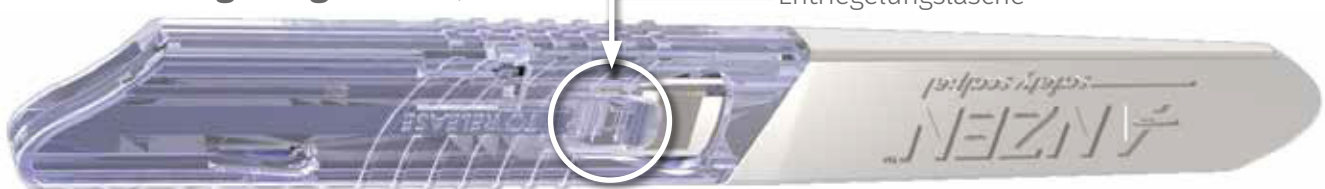

Knopf

Entriegelungslasche

Besuchen Sie anzenscalpel.com oder kontaktieren Sie uns:

MEDIPURPOSE PTE. LTD.
10 Anson Road, #12-08
International Plaza, Singapore 079903

EC REP Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatara, BKR 4013 Malta

CE 0197

MD

2862 Buford Hwy, Suite 105, Duluth, Georgia 30096, USA
tel +1-404-855-3655 | fax +1-770-559-4382 | sales@medipurpose.com

©2025 MediPurpose Pte Ltd

Ein Produkt von **MediPurpose™**
www.medipurpose.com